

FICHE PRATIQUE – AUTRES TYPES D'ÉCHANTILLONS

Sédiments urinaires

✓ Accepté

- Sédiment coloré / préparation concentrée (Diff-Quik® ou équivalent)

✗ Non acceptés

- Préparation humide
- Sédiment non coloré
- Coloration Sedi

Préparations sur bandes adhésives

✗ Généralement non adaptées

- Trop épaisses ou trop troubles pour une évaluation cytologique fiable

Cytologie fécale

✓ Accepté

- Lame colorée (Diff-Quik® ou équivalent)

✗ Non accepté

- Coloration de Gram

Informations pouvant être fournies en cytologie fécale

- ✓ Présence de cellules inflammatoires ou autres cellules nucléées
- ✓ Description générale des bactéries, levures ou autres organismes

⊘ Non réalisable :

- Identification précise des espèces bactériennes
- Comparaison quantitative Gram + / Gram -

Contrôle rapide qualité

Lame bien colorée, identifiée au crayon + noter le côté étalé (patient + site)
préparation fine et lisible, sans surcharge de matière.

